



# КРЕСЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Мы делаем необходимое доступным

## ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСЕЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА ОТ HANDICARE

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЕПИТСЯ К ЛЕСТНИЦЕ А НЕ К СТЕНЕ, ТАК ЧТО ВАМ НЕ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОДЕЛКУ СТЕН ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА. КАК И У ВСЕХ ПОДЪЕМНИКОВ **HANDICARE**, ИМЕЕТСЯ РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

## БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СТАНДАРТ

ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ **HANDICARE** ИМЕЮТ ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ОНИ РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПОДЪЕМНИК, ЕСЛИ НА ПУТИ ОКАЖЕТСЯ КАКОЕ-ЛИБО ПРЕПЯТСТВИЕ.

ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ **HANDICARE** ИМЕЮТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ, ТАК ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ПОДЪЕМНИКА.



ВЫДВИЖНОЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЕПИТЬ ЕГО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ИЛИ В ЦЕНТРЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО УДОБНЕЕ ДЛЯ ВАС, ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Подъемники **HANDICARE** помогли тысячам людей преодолеть проблемы вызванные подъемом и спуском по лестницам.

**HANDICARE** предлаает широкий спектр подъемников для прямых лестниц, чтобы удовлетворить вашим потребностям.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Миниватор 950 / 950+

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТАНДАРТ	140 кг
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СО СКЛАДНОЙ/СДВИЖНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	120 кг
ТИП ПРИВОДА	РЕЕЧНЫЙ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	1Ф, 220В, 50Гц
ДВИГАТЕЛЬ	0,5кВт, 24В
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ	24В МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ
СКОРОСТЬ	0,15 м/с
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	ПБ10-403-01

### Миниватор 950 / 950+

НАПРАВЛЯЮЩАЯ Миниватор обеспечивает функцию непрерывного заряда. Это означает, что подъемник может быть припаркован в любой точке пути, когда он не используется. Теперь Вам не нужно беспокоиться о том, где вы оставите ваш подъемник, батареи будут заряжаться в любом положении. Подъемники Миниватор совместимы с системой SLIDE TRACK и системой ручного складывания направляющей, так что если у вас есть двери вблизи нижней части лестницы, Миниватор предлагает ряд решений для предотвращения создания препятствий.

## ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЛЕСТНИЦ



### МИНИВАТОР 950

Если Вам не требуются автоматические опции, Миниватор 950 предлагает Вам безопасное и экономически эффективное решение - подножка и сиденье поворотные, с ручным управлением. Миниватор 950 оснащается ремнем безопасности с застежкой-фастекс.



### МИНИВАТОР 950+

Для тех, кому требуются автоматические опции, Minivator 950+ будет стильным решением для преодоления трудностей подъема по прямой лестнице. Он сочетает в себе функцию непрерывного заряда с сиденьем Smart, для которого доступен выбор из шести цветов. Minivator 950+ предлагает выбор ручного или автоматического складывания подножки и поворота сиденья.



### МИНИВАТОР 1000

Ищете кресельный подъемник для узких лестниц? Миниватор 1000 - отличное решение! Этот уникальный кресельный подъемник может подниматься на очень близком расстоянии от стены. Модификация Миниватор 1000 XXL выпускается с креслами большей ширины и грузоподъемностью до 200 кг.



### МИНИВАТОР 1000 ДЛЯ УЛИЦЫ

Разработан для прямых лестниц перед входной дверью. Обивка сидения выполнена из водонепроницаемого материала с UV-защитой. В комплекте поставляется чехол, которым можно закрыть подъемник, пока он не используется.

ЦВЕТ ОБИВКИ Миниватор 950



БЕЖЕВЫЙ



КАКАО



РУБИН



ПЕСОЧНЫЙ



САПФИР



ГРАФИТ



ИЗУМРУД

ЦВЕТ ОБИВКИ Миниватор 1000 для улицы



СЕРЫЙ

# КОМФОРТ



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

Когда Вы прибудете на верхнюю пошадку лестницы, Вам потребуется повернуть сиденье так, чтобы безопасно выйти на площадку. Если Вы выбрали вариант с автоматическим поворотом сиденья, продолжайте удерживать переключатель управления. Когда Вы прибыли на верхнюю пошадку лестницы - сиденье будет поворачиваться автоматически.



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДНОЖКА

Подножку и сиденье можно сложить, чтобы увеличить доступное пространство на лестнице для других пользователей. Если Вы выбираете автоматическое складывание, это позволит избежать необходимости наклоняться, чтобы сложить подножку.



## ПОЛОЖЕНИЕ СТОЯ

Кроме стандартных сидений, возможен выбор сиденья-опоры. Это сиденье было разработано специально для людей, которым трудно садиться из-за проблем со здоровьем бедра или коленей. Кресло-опора позволяет пассажиру стоять во время пользования подъемником за счет укороченной сидушки. Безопасность пассажира обеспечивается использованием вытяжного поясного ремня, также, как и у стандартных сидений.





## НУЖНА ЛИ СКЛАДНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ?



### Миниватор 950 / 950+

доступны с ручным складыванием направляющей.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СИДЕНИЕ ОПУСТИЛОСЬ ДОСТАТОЧНО НИЗКО ДЛЯ ПОСАДКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫХОДИЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЛЕСТНИЦЫ. НЕКОТОРЫЕ ДОМА ИМЕЮТ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ БЛИЗКО К НИЖНЕЙ СТУПЕНЬКЕ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ МОЖЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ЭТЫЙ ПРОЕМ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА СКЛАДНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ.

## ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ HANDICARE УПРАВЛЯЮТСЯ НАЖАТИЕМ ИЛИ УДРЖАНИЕМ БОЛЬШОГО, НАДЕЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ. Расположенный на конце подлокотника, он легко управляется с помощью кисти руки и оставляет подлокотник свободным. Все подъемники HANDICARE также поставляются с двумя пультами дистанционного управления, которые могут быть использованы для вызова подъемника. Это особенно полезно при использовании несколькими людьми.

## Сдвигная направляющая SLIDE TRACK



Сдвигная направляющая SLIDE TRACK представляет собой новаторское решение для использования с Миниватор 950 / 950+. Это уникальное решение устраняет необходимость складной направляющей. Вместо этого она перемещается вверх по лестнице в то же время, когда сиденье движется, оставляя пространство в дверях у основания лестницы беспрепятственным.

# ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ЛЕСТНИЦ (ДВИЖЕНИЕ ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ)



## Миниватор 2000

Вам нужен кресельный подъемник для узких лестниц? Миниватор 2000 - отличное решение! Это уникальный кресельный подъемник, который может подниматься на очень близком расстоянии от стены. Есть возможность выбора различных опций и обивки сидения.



## Миниватор 2000 для улицы

Этот подъемник решит проблему подъема и спуска по ступенькам от крыльца до входной двери или на террасу вашего прекрасного сада. Обивка сиденья выполнена из водонепроницаемого материала с UV-защитой. В комплекте поставляется чехол, которым можно закрыть подъемник, пока он не используется.



РЕМБРАНДТ



ВАН ГОГ



ВЕРМЕЕР

Подъемники Рембрандт, Ван Гог и Верmeer позволяют найти подходящее решение для любой лестницы. Все эти подъемники имеют одинаковые функциональные возможности - ручное и автоматическое складывание сиденья, выбор цвета и окончания направляющей, дистанционное управление с пульта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное наименование:

Подъемник кресельный «Рембрандт» - для движения по внутренним траекториям

Подъемник кресельный «Ван Гог» - для движения по внешним траекториям

Подъемник кресельный «Верmeer» - для движения по сложным винтовым траекториям

Номинальная грузоподъемность: 125 кг

Вместимость:

1 человек сидя или стоя

Тип привода:

реечный

Скорость:

максимально 0,15 м/с

Электропитание:

1 ф, 220 В, 50 Гц

Двигатель:

0,5 кВт, 24В с э/м тормозом

Схема управления:

24 В микропроцессорная

Максимальная высота подъема:

неограниченно

Соответствие нормам:

ПБ 10-403-01

Уровень шума:

не более 65 дБ

Стандартная ширина сиденья:

439 мм

Подножка:

с противоскользящим покрытием

Управление:

кнопки постоянного нажатия

Устройства безопасности:


поверхность безопасности подножки, кнопка

аварийного останова, аварийные концевики


# СДЕЛАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС




## ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

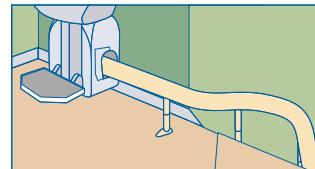


90° ПАРКОВКА

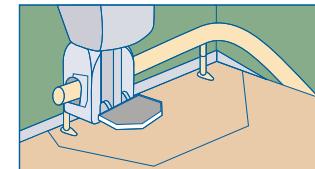


ПАРКОВКА С ПЕРЕПРОЕЗДОМ

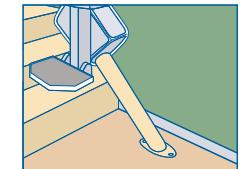


СТАНДАРТ

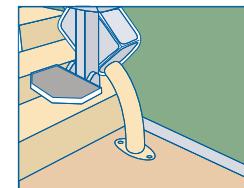


Загнутый вниз

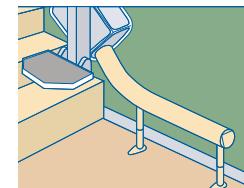

Нижний перепроезд

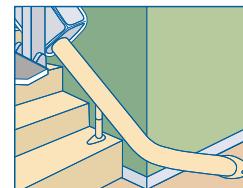

90° ПАРКОВКА

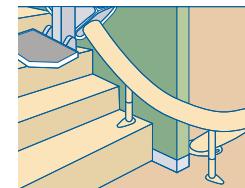

180° ПАРКОВКА

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



КРЕМОВЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



## Джойстик

Подъемник легко управляется с помощью джойстика, который может располагаться в правом или левом подлокотнике



## Пульт дистанционного управления

Нажатием кнопок «вверх» или «вниз» подъемник легко оказывается на расстоянии вытянутой руки



## Направляющая

Кресельный подъемник движется по направляющей, изготовленной на заказ по замерам вашей лестницы.



## Подставка для ног

Возможно автоматическое складывание одновременно с сиденьем\*



## Ручной поворот сиденья

При нажатии рычага вниз сиденье расфиксуется, его можно поворачивать. Отпускание рычага фиксирует сиденье в выбранном положении.

## Автоматический поворот сиденья\*

Возможно управление поворотом сидения с помощью джойстика.



## Ключ

Предотвращает несанкционированное использование

## Ремень безопасности

Обеспечивает комфорт и поддержку. Входит в базовую комплектацию



## Экономия пространства

Подлокотники и подножка легко складываются максимально освобождая пространство для остальных пользователей лестницей.

## 45° ПОВОРОТ СИДЕНИЯ ПО ДИАГНОНАЛИ

Актуально для чрезвычайно узких лестниц или пользователей, которые испытывают затруднения согибанием в коленях. Подъемник может двигаться с сидением, развернутым под углом 45°, повернутым вниз. Комплектуется специальной подставкой для ног. Это позволяет избежать неудобств при необходимости оборудования доступа в здание и получить выгоду по сравнению с установкой обычного лифта



# КРЕСЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ВЫБОР СИДЕНИЙ ДЛЯ КРЕСЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ, ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ КОТОРЫХ ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ЦВЕТА (из 3-х возможных). Наличие большого количества вариантов позволяет выбрать сиденье максимально удобное для Вас и в то же время подходящее по стилю к дизайну вашего дома. Потому что удобство должно быть красивым!



## СТАНДАРТ

ПРЕКРАСНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЭРГОНОМИКИ И КОМФОРТА ПРИ ПОСАДКЕ.  
Хотите посмотреть как работают подъёмники?



1



2  
отсканируйте  
3



## Возможные цвета кресел



БОРДОВЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



КРЕМОВАЯ  
ПУ КОЖА



## КЛАССИК

Эргономичный дизайн сидений серии «Классик» обеспечивает непревзойденный комфорт, так как они разрабатывались совместно с практикующими врачами. Изготовлены из прочного, не скользкого полиуретана. Поверхность на ощупь напоминает текстурированную кожу. Наиболее востребованная серия сидений.

## Возможные цвета кресел



АНТРАЦИТ



БОРДОВЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



## ЭЛЕГАНС

Сидения серии «Элеганс» - это сочетание изящного дизайна и уточненного комфорта. Обивка кресел выполнена из очень мягкой ткани, дарящей ощущение роскоши при прикосновении.

## Возможные цвета кресел



БОРДОВЫЙ



КРЕМОВЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

# СРАВНЕНИЕ КРЕСЕЛЬНЫХ ПОДЪМНИКОВ

ОПЦИИ	Миниватор 950	Миниватор 950+	Миниватор 1000	Миниватор 1000 XL	Миниватор 1000 XXL	Миниватор 2000
ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ						
Прямолинейная	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Криволинейная	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Тип сиденья						
Уличное исполнение	✗	✗	○	○	✗	✗
Кресло-опора	✗	○	○	○	✗	✗
Опции сидений						
Выбор обивки	●	●●●●●●●●*	●●●●●●●●●●*	●●●●●●●●●●*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●*
Расстояние между подлокотниками	✗	○	○	○	✓	✓
Увеличенный размер сиденья	✗	○	○	○	✓	✓
Умная безопасность	✗	○	○	○	○	○
Поворот сиденья						
Ручной	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Автоматический	✗	○	○	○	✓	✓
Ремень безопасности						
Вытяжной	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Стандартная застежка	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Ремень на липучке	✗	○	○	○	✗	✗
Ремень на липучке размера XXL	✗	○	○	○	✓	✓
Опции подножки						
Ручное складывание	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматическое складывание	✗	○	○	○	○	○
Связь подножки с сидением	○	○	○	○	○	○
Функции направляющих						
Зарядка в любой точке направляющей	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Две точки зарядки на направляющей	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Дополнительная точка зарядки	✗	✗	○	○	○	○
Дополнительная кнопка/пульт дистанционного управления	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Выбор цвета направляющей	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Анодированная направляющая	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Узкая анодированная направляющая	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Направляющая не выступает на верхнюю площадку	○	✗	✗	✗	✗	✗
Различные варианты окончания направляющей	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ручное откидывание направляющей	○	○	○	✗	✗	✗
Автоматически откидывающееся окончание направляющей	✗	✗	○	✗	✗	✗
Скользящая направляющая SLIDE TRACK	○	○	✗	✗	✗	✗
Грузоподъемность						
Стандартная (кг)	140**	140**	137	160	200	200
Увеличенная (кг)	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Рембрандт, ван Гог, Верmeer			УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПИСАНИЯ
			<span style="color: green;">✓</span> — ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ <span style="color: orange;">○</span> — ОПЦИОНАЛЬНО, ПОД ЗАКАЗ <span style="color: red;">✗</span> — ТАКОЙ ОПЦИИ НЕТ
<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: green;">✓</span> — КРОМЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ <span style="color: orange;">○</span> — 120 кг, ЕСЛИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОТКИДНАЯ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩАЯ
Стандарт	Классик	Элеганс	
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Модели подъемников, спроектированные для эксплуатации на улице, например для подъема по лестнице до входной двери
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Позволяет пассажиру стоять во время пользования подъемником за счет укороченной сидушки. Актуально для пассажиров, имеющих проблемы со сгибанием коленей
			Возможность выбора цвета и ткани обивки сидения, подходящей к дизайну вашего дома
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Возможен заказ сидения с увеличенным расстоянием между подлокотниками от 550 мм до 637 мм
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Увеличение глубины сидения от 360 мм до 425 мм
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Автоматическое возвращение вашего подъемника в исходную парковочную позицию, для освобождения прохода по лестнице на случай аварийной ситуации
<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	Благодаря функции поворота сидения кресло может быть развернуто лицом к посадочной площадке, что позволяет пассажиру безопасно сесть на него или сойти
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Моторизированный автоматический поворот кресла
<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	Ремень кремового цвета. Сделан по принципу автомобильного ремня безопасности
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Ремень черного цвета крепится к двум сторонам сидения и застегивается посередине (см. фото)
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Ремень черного цвета с застежкой "Велкро" обеспечивает быструю и надежную фиксацию пассажира в кресле
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Ремень черного цвета с застежкой "Велкро" увеличенной длины обеспечивает быструю и надежную фиксацию пассажира в кресле
<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	Подножка складывается и раскладывается вручную
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Подножка может подниматься или опускаться при нажатии кнопки снизу подлокотника, пока пассажир сидит в кресле
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Складное кресло одним движением. Подножка и подлокотники складываются вместе с сидением, освобождая пространство, пока подъемник не используется
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Возможность зарядки в любой точке направляющей. Нет необходимости оставлять кресло только в точках подзарядки, аккумуляторы заряжаются во время движения
<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	<span style="color: green;">✓</span>	Необходимо парковать подъемник в точках зарядки с помощью пульта управления
<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Входит стандартно в комбинации с откидным окончанием
<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Может быть актуальным при количестве площадок посадки/высадки больше двух, например, в многоэтажном доме
<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	В стандартной комплектации поставляется направляющая кремового цвета. Опционально возможно выбрать направляющую белого или коричневого цвета
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Направляющая стандартной ширины
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Возможность максимальной экономии лестничного пространства
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Используется, если выступающая направляющая будет мешать открытию двери на верхней площадке. Направляющая при этом заканчивается наравне со ступеньками
<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	См.Фото
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	В базовой комплектации направляющие проектируются с перепроездом конца лестницы, в этом случае кресло занимает дополнительное место внизу или вверху
<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: orange;">○</span>	Конец направляющей автоматически откидывается при движении кресла вниз и складывается при окончании работы подъемника
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	Направляющая заканчивается раньше конца лестницы и выдвигается при движении подъемника вниз (или вверх), чтобы он мог доехать по ней до площадки
125	125	125	
<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	<span style="color: red;">✗</span>	

# ДЕЛАЯ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ

ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ, ЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ОДИНОКИ. МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ СТАЛКИВАЕТСЯ С ТОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ.

## 9 ПРИЧИН КУПИТЬ ПОДЪЕМНИК В КОМПАНИИ ИНВАПРОМ



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Мы предлагаем подъемники для любых лестниц, как прямых, так и криволинейных, для одного или нескольких этажей.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Все подъемники HANDICARE имеют датчики для остановки перед препятствием, диагностический дисплей и ремень безопасности в базовой комплектации.



### ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подъемник управляется большим и удобным переключателем на подлокотнике с помощью кисти руки.



### КОМФОРТ

Подъемник движется почти бесшумно. Есть кресла увеличенной ширины и кресла-опоры для тех, кому удобнее стоять во время движения из-за боли при сгибании ног в коленях.



### ДИЗАЙН

Возможность выбора цвета и материала обивки для кресел\*, а также цвета направляющей\*.

\* - ОПЦИОНАЛЬНО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ

[WWW.INVAPROM.RU](http://WWW.INVAPROM.RU)

Покупая подъемник HANDICARE вы обретаете свободу передвижения по дому и ни с чем не сравнимое чувство независимости.

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

Чтобы найти ближайшего к вам дилера, посетите наш сайт [www.invaprom.ru](http://www.invaprom.ru) или позвоните по телефону (495) 926-48-66

ООО «ИНВАПРОМ»  
115516 Россия г. Москва  
ул. Промышленная, 11С3  
LIFT@INVAPROM.RU

Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях. Возможно внесение технических изменений без особого уведомления. Дополнительную техническую информацию Вы можете получить связавшись с нашим техническим специалистом по тел.: +7 495 317 17 65 или [TEHOTDEL@INVAPROM.RU](mailto:TEHOTDEL@INVAPROM.RU)



### НАДЕЖНОСТЬ

Мы продаем подъемники с гарантией 1 год.



### ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Мы делаем все, чтобы кресельные подъемники были доступны каждому. Наши менеджеры предложат вам самое экономичное решение.



### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

Установка кресельного подъемника не требует перепланировки и ремонта. Монтаж и наладка оборудования занимает обычно 2 дня.



### ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Большой опыт производства и установки подъемников позволяет выпускать технически совершенное оборудование.



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



QR-код ссылка на сайт

**ИНВАПРОМ®**

8 800 555 46 82  
бесплатно по России